

PRODUKTE FÜR DIE SCHMERZFREIE NAGELKORREKTUR

Onyfix®		GRÖSSE	ART.-NR.
Primer*	Zur Vorbereitung der Nageloberfläche	5 ml	OF1580123
Soft*	Nagelkorrekturmasse	3 ml	OF1580103
Hard*	Nagelkorrekturmasse	4,5 g	OF1580113

Onylux®		ART.-NR.
Lampen-Set	Lampe, Akku, Adapter, USB-Ladekabel, Handschlaufe	OL1580151
Kanülen	6 Stück	OL1580311
Spatel	1 Stück	OL1580321

Onyfix® und Onylux® Sets		ART.-NR.
Onyfix® Set*	Soft, Hard, Primer	OF1580143
Onylux® Toolkit	Lampe, Akku, Adapter, USB-Ladekabel, Handschlaufe, 6 Kanülen, 1 Spatel, Wattestäbchen	OL1580131

*Medizinprodukt



WIE OFT SOLLTE ONYFIX® NEU GESETZT WERDEN?

Grundsätzlich ist das System völlig offen. So können z. B. je nach Größe des Nagels zwei oder drei Korrektursysteme auf dem Nagel appliziert werden. Dies kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn ein schnelleres Resultat erzielt werden soll. Die Einschätzung, wann ein neues bzw. zusätzliches System gesetzt werden sollte, z.B. auch zur schnellen Schmerzlinderung, hängt von der individuellen Nagelsituation ab und obliegt somit dem behandelnden Podologen.

WIE LANGE BLEIBT ONYFIX® AUF DEM NAGEL?

Grundsätzlich kann Onyfix® auf dem Nagel verbleiben bis der Nagel rausgewachsen bzw. Onyfix® einmal von Nagelbett bis zum Nagelrand vorgewachsen ist. Alternativ kann das Komposit auch vom Nagel entfernt werden, wenn die Behandlung abgeschlossen ist.

DAS ONYFIX®-ANWENDUNGSVIDEO: SO LEICHT GEHT'S

Schauen Sie sich die Anwendung von Onyfix® in unserem anschaulichen Anwendungsvideo an. Scannen Sie dafür einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder gehen Sie auf onyfix.com.



SCHMERZFREIE NAGELKORREKTUR BEI EINGEROLLTEN UND EINGEWACHSENEN NÄGELN

ONYFIX® IST PATENTIERT



GESUNDE NÄGEL MIT ONYFIX® UND SO FUNKTIONIERT'S

Mit dem Onyfix® Nagelkorrektursystem sind fast alle Formen von eingerollten und deformierten Nägeln behandelbar.

- Zunächst wird der Nagel mit Cleaner und einem Fräser vorbereitet.
- Anschließend wird Onyfix® auf dem Nagel aufgetragen, in die gewünschte Form gebracht und mit blauem Licht ausgehärtet.
- Im Verlauf des physiologischen Nagelwachstums hält Onyfix® den Nagel quasi wie auf einer Schiene in seiner natürlichen Form und verhindert so ein erneutes Einrollen und Einwachsen des Nagels.
- Im Verlauf der Behandlung kann das Onyfix® Nagelkorrektursystem abgenommen werden oder rauswachsen. Bei Bedarf kann auch ein weiteres Onyfix®-System aufgesetzt werden. Hier ist das Abnehmen des vorhandenen Systems nicht notwendig.

DENKEN SIE QUER: ZUG IST NICHT NOTWENDIG!

Onyfix® ist Nagelkorrektur ganz neu gedacht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nagelspannen, die über Hebel- oder Rückstellkräfte eine Begradigung des Nagels anstreben, macht sich Onyfix® das natürliche Nagelwachstum zu Nutze: durch Fixierung des Nagels in der proximalen (körpernahen) Form, wird verhindert, dass der Nagel sich im Verlauf des Wachstums einrollen und einwachsen kann. Und das für den Patienten vollkommen schmerzfrei und nachhaltig!

GESUNDE NÄGEL MIT ONYFIX®: DAS WIRKPRINZIP



Ausgangssituation Nach ca. 10 Wochen Nach ca. 20 Wochen Nach ca. 30 Wochen

ZIEL DER SCHMERZFREIEN NAGELKORREKTUR

- Ein Fehlwachstum des Nagels wird langsam und kontinuierlich korrigiert.
- Durch die feste Schienung des Nagels durch das Onyfix® Nagelkorrektursystem wird der Nagelfalz dauerhaft entlastet und die Ursache möglicher Beschwerden beseitigt.
- Der irritierende Druck auf den Nagelfalz wird sofort nach Einsatz des Onyfix® Nagelkorrektursystems reduziert.
- Die Verwendung des Onyfix® Nagelkorrektursystems kann dazu beitragen, eine Nagelextraktionsoperation (Emmert-Plastik) zu vermeiden.



VORTEILE FÜR SIE UND IHRE PATIENTEN

Für Sie

- 🎓 Einfach zu erlernen und anzuwenden
- 🕒 Applikation inkl. Vorbereitung in nur 7 Minuten möglich
- 💰 Ergiebig und kostengünstig: ca. 40 Anwendungen pro Produkt
- 📊 Medizinprodukt mit studienbelegter Wirksamkeit
- ✅ Auch für stark eingerollte und eingewachsene Nägel

Für Ihre Patienten

- 😊 Schmerzfremde Behandlung
- 🕒 Umgehende Linderung von Schmerzen und Entzündungen
- 📅 Hohe Flexibilität bei der Terminfindung für Nachkontrollen
- 🔄 Nachhaltiger Behandlungserfolg durch natürliches Nagelwachstum
- 🏊 Alle Sportarten sind weiter möglich
- 👉 Fußnägel können lackiert werden

DOKUMENTIERTE WIRKSAMKEIT VON ONYFIX®

BEHANDLUNGSFORTSCHRITT MIT ONYFIX® HARD



Ausgangssituation Nach 6 Wochen Nach 12 Wochen Nach 18 Wochen

BEHANDLUNGSFORTSCHRITT MIT ONYFIX® SOFT



Ausgangssituation Nach 6 Wochen Nach 12 Wochen Nach 18 Wochen

Im April 2017 startete eine umfangreiche, multizentrische Anwendungsbeobachtung zur Wirksamkeit des Onyfix® Nagelkorrektursystems. Dabei wurden 103 Patienten beobachtet. Die wichtigsten Ergebnisse: Selbst extreme Nageldeformationen (z.B. Pincer Nail) können mit dem Onyfix® Nagelkorrektursystem erfolgreich behandelt werden. Die Deformationen bilden sich im Verlauf des physiologischen Nagelwachstums sukzessive zurück. Durch die simple aber effektive Technologie des Systems kommt es zu einer nachhaltigen Korrektur der betroffenen Nägel. Gleichzeitig kommt es zu einem sehr schnellen Rückgang von Entzündungen in den Nagelfalzen, einem sukzessiven Rückgang von Nagelablösungen und Nagelveränderungen. Das wichtigste Ergebnis besteht allerdings darin, dass die Patienten zumeist direkt nach der Applikation des Systems schmerzfrei sind.

STUDIEN-
BELEGTE
WIRKSAMKEIT

Quellen:

Hanisch, 2018, Kosm. Med. 3.18: 118-125,

Mainusch, Oliver M., „Pincer nail' Konservative Therapie des Röhrennagels“, Hautnah dermatologie, Januar 2020